




מדריך למשתמש


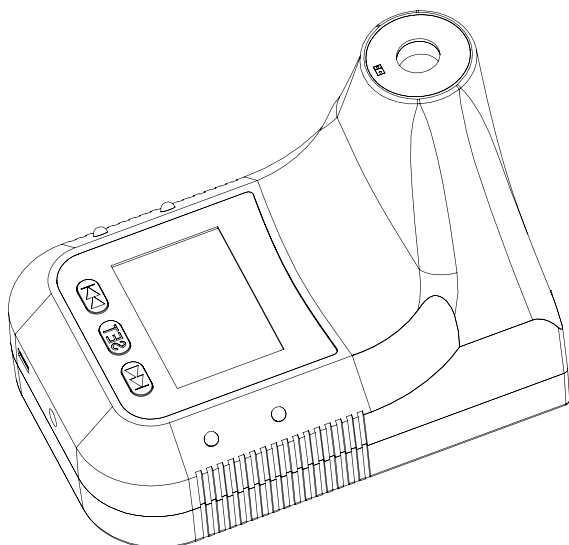


העיקר הבריאות
מוצרי רפואה, שיקום, ניהוד וסיעוד


יבואן: העיקר הבריאות (2017) בע"מ. הנגר 12, מודיעין

CE FC RoHS
מיוצר בסין


11. הכנסת סוללה:
לפתוח את מכסה בית הסוללה ולהכניס סוללה חדשה בהתאם לקוטביות המסומנת.

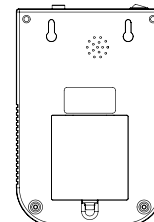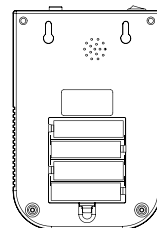

12. שיטת התקנה: תלייה על מסמר, התקנה על מסגרת.

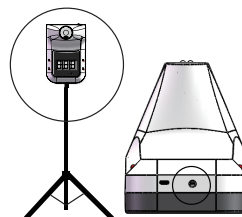

2. התקנה על מסגרת

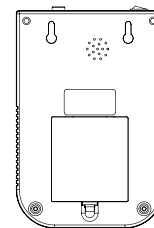


1. תלייה על מסמר


6. אזהרות

1. באחריות המשתמש להבטיח את תאימות הסביבה האלקטרומגנטית של המכשיר אל המכשיר, כדי שהמכשיר יפעל כראוי.
2. מומלץ לבדוק את הסביבה האלקטרומגנטית לפני השימוש במכשיר.
3. בעת שינוי סביבת ההפעלה, יש לתת למכשיר לעמוד למשך למעלה מ-30 דקות לפני הפעלתו.
4. יש לקרוב את המצח אל מד החום.
5. יש להימנע מאור שמש ישיר בעת שימוש בחוץ.
6. להרחיק ממזגנים, מאווררים וכד'.
7. להשתמש בסוללות מאושרות ובטוחות. סוללות לא מאושרות או שלא ניתן לטעון מחדש עשויות לגרום להתלקחות או לפיצוץ.


4. הגדרות מצב הפעלה:
ללחוץ על לחצן ה-SET עד שמגיע ל-F2, ללחוץ על הלחצנים השמאלי והימני כדי לעבור בין מצבי ההפעלה.

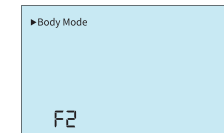

6. הגדרות עוצמת צליל:
ללחוץ על לחצן ה-SET עד שמגיע ל-F4, זהו מצב הגדרת עוצמת הצליל. ללחוץ על הלחצנים השמאלי והימני כדי להתייחס את העוצמה. ככל שיש יותר סוגריים מאחורי הממוקד הקטן, כך העוצמה חזקה יותר והעלמות סמל הממוקד משמעותו מצב השתקה.

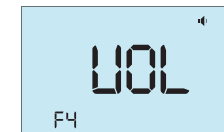


8. הגדרות שפה:
ללחוץ על לחצן ה-SET עד שמגיע ל-F6, ללחוץ על הלחצנים השמאלי והימני כדי לעבור בין השפות של ההגדרות הקוליות.
CH: סינית. EN: אנגלית.

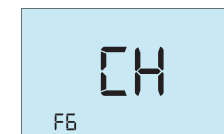


10. חיבור USB:

כדי לחבר למחשב עם כבל USB מסוג C, יש לפתוח את התוכנה שבמחשב. ניתן לחבר את המכשיר ולאחסן את תוצאות המדידות השונות בזמן אמת. להנחיות נוספות, נא לקרוא את המדריך למשתמש בתוכנה.

3. הגדרות יחידת טמפרטורה:
ללחוץ על לחצן ה-SET עד שמגיע ל-F1, ללחוץ על הלחצנים השמאלי והימני כדי לעבור בין צלזיוס לפרהייט.
C: צלזיוס. F: פרהייט.

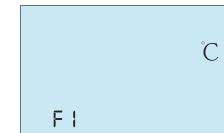

5. הגדרות התרעה טמפרטורה:
ללחוץ על לחצן ה-SET עד שמגיע ל-F3, זהו מצב הגדרת ההתרעה של מצב הגוף. ללחוץ על הלחצנים השמאלי והימני כדי להחליף את טמפרטורת ההתרעה בין 37.0~38.0. טמפרטורת ברירת המחדל היא 37.3°C.
הערה: ההתרעה על טמפרטורה תקפה רק במצב גוף.

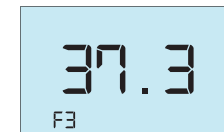


7. הגדרות אור אחורי:

ללחוץ על לחצן ה-SET עד שמגיע ל-F5, זהו מצב הגדרת אור אחורי. ללחוץ על הלחצנים השמאלי והימני כדי להפעיל ולכבות את האור האחורי.
ON: הפעלת האור האחורי.
OFF: כיבוי האור האחורי.




9. הגדרות אות פלט:

ללחוץ על לחצן ה-SET עד שמגיע ל-F7, ללחוץ על הלחצנים השמאלי והימני כדי לעבור בין סוגי אות הפלט. S1 משמעותו מצב החלפה ו-S2 משמעותו מצב פולסים. להנחיות נוספות אודות אותות הפלט, נא לקרוא את המדריך המלא למשתמש.

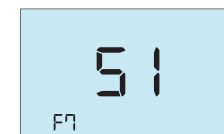




1. מבוא

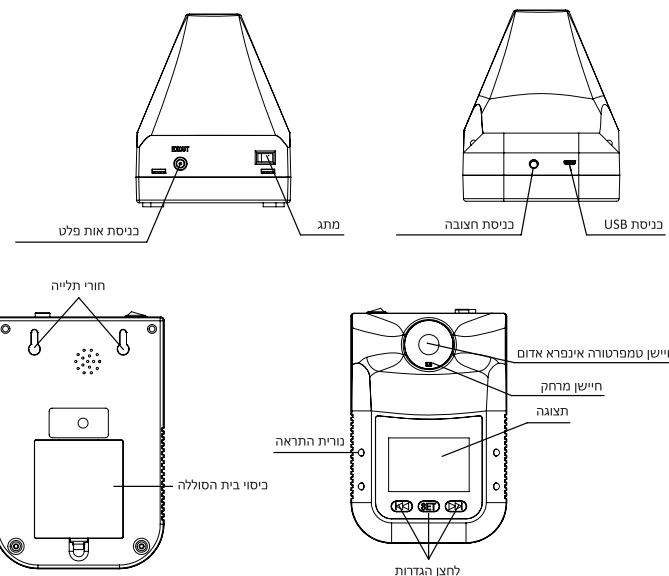

2. מפרט

- דיוק: ± 0.2 מעלות 35°C - 42°C , יש לשים באזור בו עומדים להפעיל את המכשיר למשך 30 דקות לפני השימוש).
- הפעלת ההתראה: התראה אוטומטית על חריגה, הבהוב + צליל התראה למשך כ-10 שניות.
- מרחק מדידה: 5 ס"מ - 10 ס"מ למדידה אוטומטית.
- תצוגה: צג LCD.
- ממשק תקשורת: USB סוג C.
- מקור אספקת מתח: 4 סוללות AA (ניתן לטעון ב-10 אספקת מתח פנימי וחיצוני).
- שיטת התקנה: תליה על מסמר, התקנה של המסגרת.
- טמפרטורות סביבה: 10°C - 40°C (טמפרטורה מומלצת 15°C - 35°C).
- טווח מדידה: 0°C - 50°C .
- זמן תגובה: 0.5 שניות.
- המתנה: 30 שניות המתנה אוטומטית במהלך פרקי זמן ללא הפעלה.
- מתח כניסה: DC 5V 500mA.
- משקל: 303 גרם.
- 115x140x170 ס"מ.
- יכולת מדידה: 9999 פעמים.


3. תצוגה

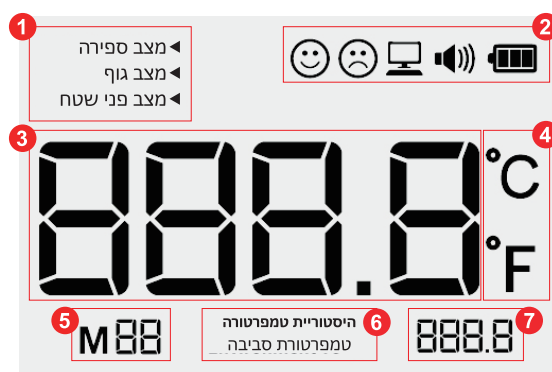

- מצב הפעלה: מצב ספירה, מצב גוף, מצב פני שטח.
- חיווי מצב (משמאל לימין): ביטוי, מצב חיבור USB, עוצמת צליל, טעינה.
- תוצאות מדידה: מצב טמפרטורה או מצב ספירה.
- יחידת טמפרטורה: צלזיוס או פרנהייט.
- הגדרת פריט או נתון עבר: M** משמעותו מספר נתון מהעבר, F* משמעותו מספר הגדרת הפריט.
- היסטוריית טמפרטורה או טמפרטורת סביבה.
- מצב טמפרטורת סביבה.


4. תיאור מצב

- מצב המתנה:**
האור האחורי כבוי והטמפרטורה נשארת מוצגת (איור 1).

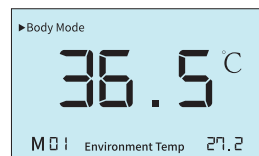


(איור 1)

- הסוללה התרוקנה:**
על הצג מופיע שהסוללה ריקה והסמל מהבהב (איור 2).

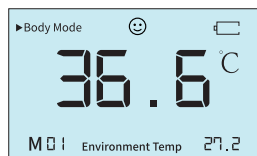


(איור 2)

- טמפרטורה רגילה:**
נוריות ירוקות מהבהבות בשני הצדדים.

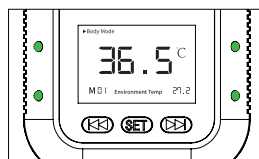

(איור 3)


- טמפרטורה חריגה:**
נוריות אדומות מהבהבות בשני הצדדים.

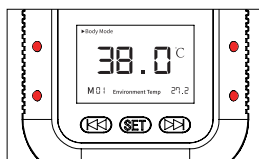


(איור 4)

- מחוץ לטווח (במצב גוף):**

LO': טמפרטורה נמוכה במיוחד, מתחת ל-35 מעלות צלזיוס (איור 5)
HI': טמפרטורה גבוהה במיוחד, מעל 42 מעלות צלזיוס (איור 6)

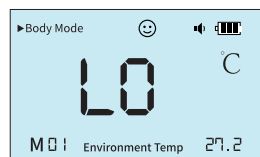

(איור 5)

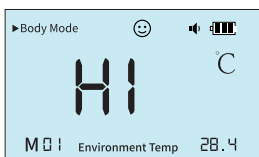


(איור 6)

5. הוראות הפעלה

- מדידת טמפרטורה:**

יש להתקרב אל מד החום מלפנים, עד למרחק של 5-10 ס"מ (איור 7).

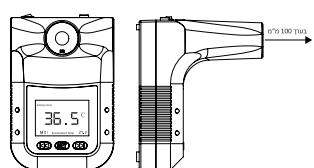

(איור 7)

- בדיקת היסטוריית טמפרטורות:**

ללחוץ על הלחצנים השמאלי והימני כדי לבדוק היסטוריית טמפרטורה, M** משמעותו הטמפרטורה שנבדקה לאחרונה. המכשיר זוכר כרגע עד 30 מדידות אחרות.

