


העיקר הבריאות

מוצרי בריאות, שיקום, ניידות וסיעוד ביתי

מעלון כיסא PREMIUM EUROLIFT

הוראות שימוש

הפעלת הכיסא

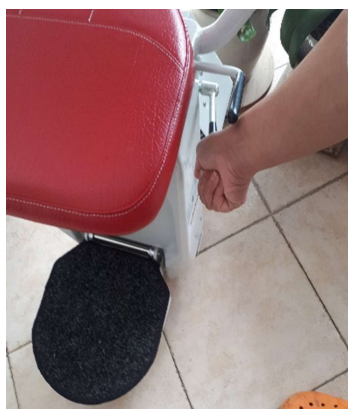

3. להרים את
הידית השחורה
מימין להורדת
משטח הרגליים



2. להוריד ידנית
את מושב הכיסא



1. הכיסא מקופל
במצב התחלתי



6. לחגור את
חגורת הבטיחות



5. להתיישב
בביטחה על
הכיסא



4. להוריד ידנית
את המשענות
בצדדים

העיקר הבריאות

מוצרי בריאות, שיקום, ניידות וסיעוד ביתי



8. הנסיעה בטוחה ורצופה כל עוד הידית הקטנה (הג'ויסטיק) מוטית, כאשר הידית באמצע הכיסא עוצר



7. הפעלת הכיסא ע"י הטיית הידית השחורה הקטנה בקצה המשענת ימינה או שמאלה
בעדינות



10. יש להוריד את הידית השחורה (יש ידית בצד ימין וגם בשמאל) ולהסתובב עם המושב לכיוון המשטח הישר כדי לרדת בביטחה

2



9. עם הגעת הכיסא למדרגה העליונה הוא יעצור בעצמו

העיקר הבריאות

מוצרי בריאות, שיקום, ניידות וסיעוד ביתי

מה עושים במידה והכיסא לא עובד



2. כאשר הכיסא לא עומד בתחנה הסופית הוא ישמיע צפצוף התרעה לאחר זמן מה הוא יפסיק לפעול בגלל התרוקנות הסוללות



1. יש לוודא תמיד שהכיסא חונה בתחנה הסופית (למטה או למעלה) כדי להבטיח את טעינת הסוללות



4. הנורה האדומה מראה שהמכשיר פועל והירוקה על כך שהסוללות טעונות



3. יש לבדוק שכפתור ההפעלה נמצא על מצב 1

העיקר הבריאות



מוצרי בריאות, שיקום, ניידות וסיעוד ביתי



6. לשחרר את כפתור
עצירת החירום יש לסובבו
בעדינות עם כיוון השעון
והוא יקפוץ החוצה בעצמו



5. יש לבדוק שכפתור
עצירת החירום אינו לחוץ,
במידה וכן הוא משבית את
פעולת הכיסא

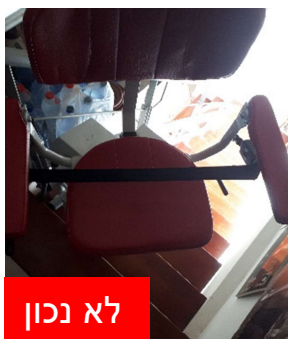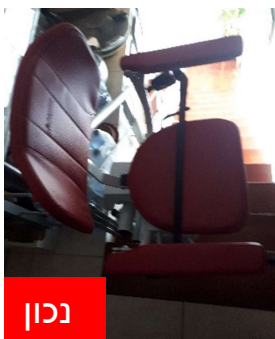

7. יש לשים לב כי כל עוד המושב נמצא בסיבוב כלפי המשטח
הישר הכיסא לא יסע, יש להחזיר אותו באמצעות הידיות
בצדדים למצבו המקורי- ניצב למדרגות, בהגיעו למצב הנכון
יישמע קול קליק והכיסא יחזור לפעול

8. בחלק מהדגמים מותקן (לבקשת הלקוח) התקן בטיחות בחגורת
הבטיחות המונע פעולת הכיסא אם החגורה לא חגורה היטב.